







杏 聯 醫 事 檢 驗 所		採 檢 手 冊	文 件 編 號	QP-5.4-3
版 次	2.1		頁 次	3
發 行 日 期	2020.08.01		總 頁 數	41

附件 7.1

檢驗容器說明一覽表

一般檢驗的採檢容器		
採 檢 容 器 1	藍頭試管 (Sodium Citrate) 	檢驗項目：試用血液凝固學檢驗 PT、APTT、FDP、Fibrinogen、D-Dimer (含 3.2% Sodium Citrate 抗凝劑，採血務必達指定刻度，且採血後立即混合均勻，不可凝固)
採 檢 容 器 2	生化管 	檢驗項目：各項生化、血清免疫、病毒檢查。
採 檢 容 器 3	黃頭試管 (SST 試管) 	檢驗項目：各項生化、血清免疫、病毒檢查。 (含促凝劑與分離膠；抽完血後，需 1 小時內離心完成)
採 檢 容 器 4	紫頭試管 (EDTA 試管) 	檢驗項目：試用血液學、醣化血色素、血色素電泳、同半胱胺酸、G-6-PD、HLA-B27、血型、BNP (含 EDTA 抗凝劑，採血後立即混合均勻，不可凝固)
採 檢 容 器 5	灰頭試管 (NaF 試管) 	檢驗項目：試用生化血糖檢驗 (含 Sodium Fluoride，採血後立即混合均勻，不可凝固)
採 檢 容 器 6	塑膠空試管 	檢驗項目：適用於任何分裝後之血清或血漿

杏 聯 醫 事 檢 驗 所		採 檢 手 冊	文 件 編 號	QP-5.4-3
版 次	2.1		頁 次	3
發 行 日 期	2020.08.01		總 頁 數	41

一般檢驗的採檢容器				
採 檢 容 器 7	ESR(粉紅試管) 	檢驗項目：ESR (含 0.129M Na Citrate，採血務必達指定刻度；且採血後立即混合均勻，不可凝固)		
採 檢 容 器 8	塑膠尖底離心管 (12mL) 	檢驗項目：尿液常規、Microalbumin、morphine (嗎啡 amphetamine (安非他命)、等藥物試驗。		
採 檢 容 器 9	糞便採集瓶(藍蓋附刮勺) 	檢驗項目：糞便常規檢查、糞便潛血化學法		
採 檢 容 器 10	S-Y 糞便採集瓶 	檢驗項目：MIF 濃縮法、寄生蟲卵 (檢體量約花生米大小即可)		
採 檢 容 器 11	FOBT 糞便採集盒 	檢驗項目：糞便潛血免疫定量法使用		
採 檢 容 器 12	寬口無菌杯 	檢驗項目：各種有關細菌培養之檢體 (Ex：尿液、體液、糞便、水質等)、精液分析。		

杏 聯 醫 事 檢 驗 所		採 檢 手 冊	文 件 編 號	QP-5.4-3
版 次	2.1		頁 次	3
發 行 日 期	2020.08.01		總 頁 數	41

一般檢驗的採檢容器

採 檢 容 器 13	50mL 尖底離心管 	檢驗項目:適用痰液、TB、體液的培養					
採 檢 容 器 14	藍頭Transtube(嗜氧) 	檢驗項目:適用 Stool、GBS、Pus/Wound 培養					
採 檢 容 器 15	黑頭Transtube(厭氧) 	檢驗項目:適用 Stool、Pus/Wound 培養、厭氧培養					
採 檢 容 器 16	無菌痰盒 	檢驗項目:痰液培養					
採 檢 容 器 17	血液培養瓶				檢驗項目:血液培養		
	條碼標籤簡稱	一般血瓶		去抗生素血瓶		小兒血瓶	
	適用範圍	一般血液培養		使用抗生素病患血液培養專用		小兒專用血液培養	
	採血量	5-10ml	5-10ml	5-10ml		5-10ml	1-3ml
	血瓶						
	需氧瓶	厭氧瓶	需氧瓶	厭氧瓶	小兒血瓶		